

## Ягодичные имплантаты

Овальные, гладкие  
Овальные, POLYtxt®  
Овальные, Mesmo  
Круглые, гладкие

# POLYTECH

Health & Aesthetics

Ягодичные имплантаты,  
наполненные силиконовым гелем,  
производятся с тремя видами  
поверхности



# Ягодичные имплантаты, CE 0483

## Описание продукции

Наполненные силиконовым гелем ягодичные имплантаты производятся с тремя различными типами поверхностей:

- гладкой
- POLYtxt® (текстурированной)
- Mesmo (микротекстурированной)

Хирург может выбрать из пяти размеров овальных и трех размеров круглых имплантатов и достичь оптимальных результатов как при увеличении, так и при реконструкции ягодичной области.

## Информация о материалах

Оболочка всех ягодичных имплантатов состоит из прочного, упругого и высокоэластичного силиконового эластомера с барьерным слоем. Оболочка наполнена высоко перекрестно-связанным силиконовым гелем. Учитывая возможность больших нагрузок на имплантаты, было отдано предпочтение гелю с плотной консистенцией. Поверхность имплантатов может быть гладкой, POLYtxt® и, так называемой, поверхностью Mesmo. Свойства поверхности с меньшими порами сравнимы со стандартной текстурой.

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

## Способ применения

В соответствии с техникой операции по увеличению ягодиц, предложенной доктором Роблесом (Robles et al., Cir Plast Iberolatinoamericana, 10:4, 1984) имплантаты устанавливаются между musculus gluteus maximus и musculus gluteus medius, через надкрестцовый разрез (см. рис.). В литературе описываются также и другие методики эндопротезирования.

## Показания

- Увеличение
- Коррекция контура
- Реконструкция после травмы
- Замена имплантата

## Важная информация

Ягодичные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

**Внимание:** Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.


Дистрибьютор:

ООО Политех Хелс Украина  
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина  
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537  
✉ office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Кат. No.	Объем (мл)	Размеры (мм)		
		A	B	C


### Овальные, гладкие

10300-115	115	80	27	120
10300-215	215	105	30	142
10300-290	290	114	33	152
10300-360	360	125	34	163
10300-450	450	132	38	174

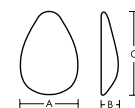


### Овальные, Mesmo

15300-115	115	80	27	120
15300-215	215	105	30	142
15300-290	290	114	33	152
15300-360	360	125	34	163
15300-450	450	132	38	174

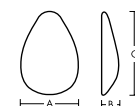

### Овальные, POLYtxt®

20300-115	115	80	27	120
20300-215	215	105	30	142
20300-290	290	114	33	152
20300-360	360	125	34	163
20300-450	450	132	38	174


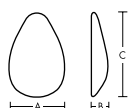


### Круглые, гладкие

10301-200	200	107	35	
10301-250	250	112	41	
10301-300	300	118	44	



Размеры приблизительные

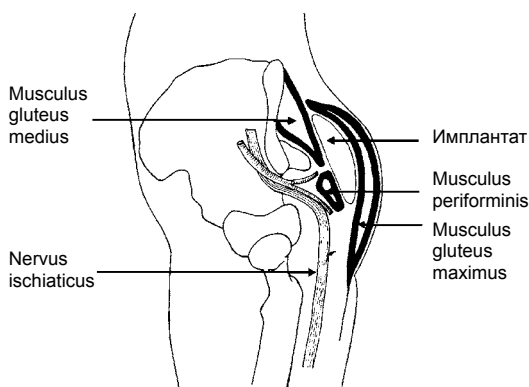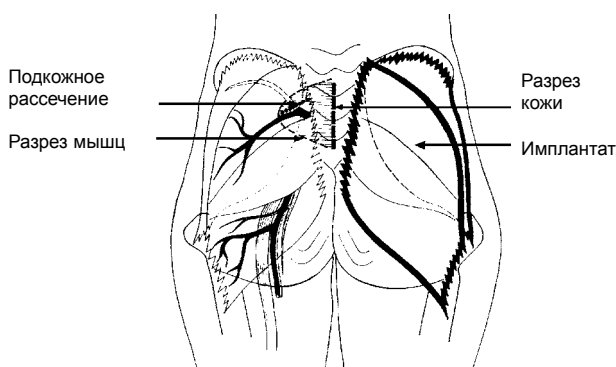

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH  
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany  
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30  
www.polytech-health-aesthetics.com • ✉ info@polytechhealth.com

