


Пекторальные имплантаты

Овальные имплантаты с
текстурированной поверхностью
POLYtxt®

POLYTECH

Health & Aesthetics

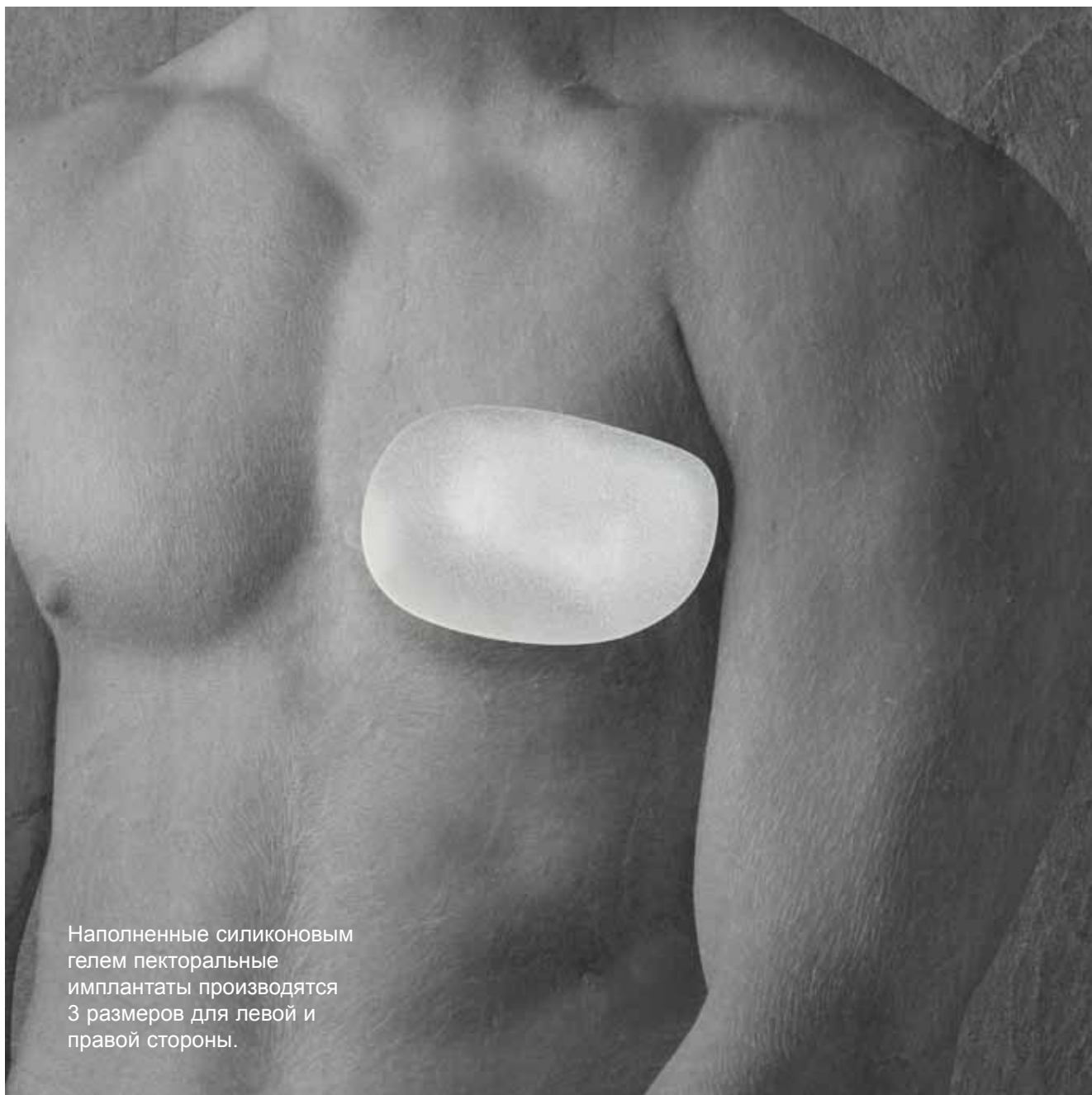

Наполненные силиконовым
гелем пекторальные
имплантаты производятся
3 размеров для левой и
правой стороны.

Пекторальные имплантаты, CE 0483

Описание продукции

Наполненные силиконовым гелем пекторальные имплантаты производятся в виде POLYtxt® текстурированных имплантатов овальной формы для увеличения и реконструкции при дефектах мягких тканей.

По требованию пекторальные имплантаты могут также производиться и с гладкой поверхностью. Учитывая возможность больших нагрузок на имплантаты, по сравнению, например, с имплантатами молочной железы, было отдано предпочтение гелю с плотной консистенцией. Для облегчения введения на медиальном крае имплантата расположен так называемый специальный «язычок».

Однокамерные пекторальные имплантаты имеют разные размеры и производятся для левой и правой стороны грудной клетки.

Информация о материалах

Оболочка пекторальных имплантатов, так же как и ягодичных имплантатов, состоит из прочного, упругого и высокоэластичного силиконового эластомера с барьерным слоем. Имплантаты наполнены высокоперекрестно-связанным силиконовым гелем.

Производство и качество имплантатов соответствуют требованиям международных стандартов по контролю качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые материалы разрешены к применению в медицинской практике.

Способ применения

Пекторальные имплантаты используются как в эстетической, так и в реконструктивной хирургии. Для установки обычно используется аксиллярный доступ в положении пациента на спине, в отведении руки на 90° с целью поднятия мышцы. Имплантаты могут быть установлены под мышцу.

Показания


- Увеличение контура
- Коррекция формы
- Реконструкция после травмы
- Синдром Поланда
- Замена имплантата

Важная информация


Пекторальные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.


Разрез

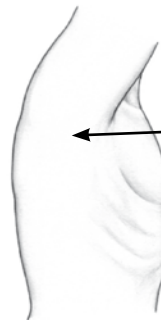

Введение имплантата

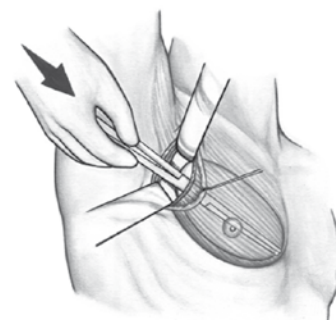

Окончательный результат

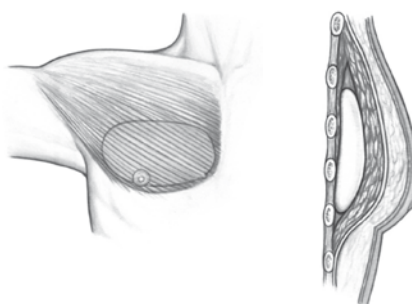

Кат. No	Объем (мл)	Размеры (см)		
		A	B	C

Овальные. POLYtxt®

20500-190R	192	14.7	2.4	10.2
20500-190L	192	14.7	2.4	10.2
20500-230R	231	16.0	2.7	10.7
20500-230L	231	16.0	2.7	10.7
20500-300R	301	16.9	2.9	11.6
20500-300L	301	16.9	2.9	11.6

R = правый, L = левый

Размеры приблизительные



Пекторальные имплантаты с гладкой поверхностью производятся по требованию. Для заказа замените первые две цифры каталожного номера на 10, например, 10500-230R.

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

Дистрибьютор:

ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
☎ +38 044 256 2538 • 📠 +38 044 256 2537
📧 office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

