

Opticon® *Sublime Line* POLYtxt®

Имплантаты молочной железы, наполненные силиконовым гелем, укороченное основание, поверхность POLYtxt®, производятся в четырех проекциях, максимум объема

POLYTECH

Health & Aesthetics







Заполненные силиконовым гелем имплантаты Opticon® имеют текстурированную поверхность POLYtxt®, укороченное основание, анатомическую проекцию с наивысшей точкой в нижней половине. Степень заполнения имплантатов *Sublime Line*® увеличена для достижения оптимального объема.





Консистенция этих высококачественных имплантатов





очень близка к естественным тканям молочной железы. Имплантаты производятся в четырех проекциях: низкий профиль (TLS), средний профиль (TMS), высокий профиль (THS) и экстра высокий профиль (TXS).





Дополнительный размер D является вспомогательным критерием для правильного размещения ареолы относительно инфрамаммарной складки.

**Имплантаты, созданные POLYTECH –
качество, созданное в Германии**

| Opticon® TLS – Низкий профиль, POLYtxt® | | | | | |
|---|---|---|---|---|------------|
| Кат № | Размеры (мм) | | | | Объем (мл) |
| |  |  |  |  | |
| | A | C | B | D | |
| 20744-110* | 100 | 84 | 28 | 41 | 110 |
| 20744-120 | 105 | 88 | 29 | 42 | 120 |
| 20744-140* | 110 | 92 | 29 | 44 | 140 |
| 20744-160 | 115 | 97 | 30 | 46 | 160 |
| 20744-175* | 120 | 101 | 31 | 48 | 175 |
| 20744-200 | 125 | 105 | 32 | 49 | 200 |
| 20744-220* | 130 | 109 | 33 | 51 | 220 |
| 20744-240 | 135 | 113 | 34 | 53 | 240 |
| 20744-270* | 140 | 118 | 35 | 55 | 270 |
| 20744-295 | 145 | 122 | 35 | 56 | 295 |
| 20744-325* | 150 | 126 | 36 | 58 | 325 |
| 20744-360 | 155 | 130 | 37 | 60 | 360 |

| Opticon® THS – Высокий профиль, POLYtxt® | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------|
| Кат № | Размеры (мм) | | | | Объем (мл) |
| |  |  |  |  | |
| | A | C | B | D | |
| 20746-115 | 85 | 71 | 39 | 47 | 115 |
| 20746-130* | 90 | 76 | 40 | 49 | 130 |
| 20746-155 | 95 | 80 | 42 | 51 | 155 |
| 20746-175* | 100 | 84 | 44 | 54 | 175 |
| 20746-205 | 105 | 88 | 45 | 56 | 205 |
| 20746-230* | 110 | 92 | 47 | 58 | 230 |
| 20746-265 | 115 | 97 | 49 | 61 | 265 |
| 20746-295* | 120 | 101 | 51 | 63 | 295 |
| 20746-335 | 125 | 105 | 53 | 65 | 335 |
| 20746-375* | 130 | 109 | 55 | 68 | 375 |
| 20746-420 | 135 | 113 | 57 | 70 | 420 |
| 20746-460* | 140 | 118 | 59 | 72 | 460 |
| 20746-510 | 145 | 122 | 61 | 75 | 510 |
| 20746-560* | 150 | 126 | 62 | 77 | 560 |
| 20746-615 | 155 | 130 | 64 | 80 | 615 |

| Opticon® TMS – Средний профиль, POLYtxt® | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|
| Кат № | Размеры (мм) | | | | Объем (мл) |
| |  |  |  |  | |
| | A | C | B | D | |
| 20745-125 | 95 | 80 | 35 | 45 | 125 |
| 20745-145* | 100 | 84 | 36 | 47 | 145 |
| 20745-165 | 105 | 88 | 37 | 49 | 165 |
| 20745-185* | 110 | 92 | 38 | 51 | 185 |
| 20745-210 | 115 | 97 | 40 | 53 | 210 |
| 20745-235* | 120 | 101 | 41 | 55 | 235 |
| 20745-265 | 125 | 105 | 43 | 57 | 265 |
| 20745-295* | 130 | 109 | 44 | 59 | 295 |
| 20745-330 | 135 | 113 | 45 | 61 | 330 |
| 20745-365* | 140 | 118 | 47 | 63 | 365 |
| 20745-400 | 145 | 122 | 48 | 65 | 400 |
| 20745-445* | 150 | 126 | 49 | 67 | 445 |
| 20745-490 | 155 | 130 | 51 | 69 | 490 |

| Opticon® TXS – Экстравысокий профиль, POLYtxt® | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|
| Кат № | Размеры (мм) | | | | Объем (мл) |
| |  |  |  |  | |
| | A | C | B | D | |
| 20747-115* | 80 | 67 | 45 | 50 | 115 |
| 20747-130 | 85 | 71 | 47 | 52 | 130 |
| 20747-160* | 90 | 76 | 49 | 55 | 160 |
| 20747-185 | 95 | 80 | 51 | 58 | 185 |
| 20747-215* | 100 | 84 | 53 | 61 | 215 |
| 20747-240 | 105 | 88 | 55 | 63 | 240 |
| 20747-280* | 110 | 92 | 57 | 66 | 280 |
| 20747-320 | 115 | 97 | 59 | 69 | 320 |
| 20747-360* | 120 | 101 | 61 | 71 | 360 |
| 20747-400 | 125 | 105 | 63 | 74 | 400 |
| 20747-450* | 130 | 109 | 65 | 77 | 450 |
| 20747-500 | 135 | 113 | 67 | 79 | 500 |
| 20747-560* | 140 | 118 | 69 | 82 | 560 |
| 20747-615 | 145 | 122 | 71 | 85 | 615 |

Размеры указаны приблизительно. Последующие размеры могут производиться под заказ. Гладкие, наполненные силиконовым гелем, сайзеры (нестерильные, ре-стерилизуемые) выпускаются в размерах, отмеченных знаком (*).

Информация о материалах

Имплантаты производства POLYTECH Health & Aesthetics заполнены высоко перекрестно-связанным Formoq® гелем, отличаются своей естественной консистенцией. Благодаря «эффекту памяти» гель всегда возвращается к первоначальной форме после механического сжатия.

Устойчивая к химическому и механическому воздействию, эластичная оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов содержит несколько слоев силиконового эластомера. Для достижения высокой степени безопасности, оболочка наполненных силиконовым гелем имплантатов оснащена дополнительным барьерным слоем.

Оболочка имплантата имеет текстурированную поверхность POLYtxt®. Данная текстура известна своей надежностью и, как было доказано, обеспечивает снижение частоты развития капсулярной контрактуры¹.

¹: частота капсулярной контрактуры при использовании имплантов с текстурированной поверхностью: 8-15% (Iwagwu+Frame, 1997), что на 15% ниже, чем при использовании гладких имплантатов (Handel, 2008)

Дистрибьютор:
ООО Политех Хелс Украина
ул. Богомольца, 4, офис 130 • 01024, Киев, Украина
+38 044 256 2538 • +38 044 256 2537
office@polytechhealth.kiev.ua • www.polytechhealth.com.ua

Производство имплантатов базируется на системе управления качеством в соответствии со стандартами ISO 9001 и ISO 13485. Качество всей продукции, которая используется в производстве, соответствует требованиям к медицинским имплантируемым материалам.

Показания

- Реконструкция груди после мастэктомии
- Увеличение и коррекция контура
- Коррекция асимметрии, аплазии или гипоплазии
- Комбинированные деформации молочной железы и грудной клетки
- Птоз или атрофия
- Замена имплантата

Важная информация

Имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными. ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Производитель:
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH
Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany
☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30
www.polytech-health-aesthetics.com • 📧 info@polytechhealth.com

